

GEBRAUCHSANWEISUNG ZUR VERWENDUNG EINER PARTIKELFILTRIERENDEN HALBMASKE

1. Die Maske über Nase und Mund in Position halten.
2. Die Ohrbänder hinter beide Ohren ziehen.
3. Anschließend die Nasenklammer durch Drücken um die Nase herum formen, so dass die Maske dicht am Gesicht sitzt.
4. Zur Überprüfung des korrekten Sitzes beide Hände über die Maske halten und kräftig ausatmen.
5. Falls Luft an den Seiten der Maske austritt, den Vorgang wiederholen, bis die Maske dicht am Gesicht sitzt.
6. Wenn keine ordnungsgemäße Abdichtung erreicht werden kann, dürfen Sie den kontaminierten Bereich nicht betreten, da es eventuell zu Erkrankungen oder Infektionen führen kann.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen kann die Wirksamkeit der Maske verringern und zu Erkrankungen führen!

Wie bei jeder Atemmaske muss der Träger vor der Anwendung angemessen informiert werden.

Vor dem Gebrauch muss der Träger stets prüfen, ob die Maske in einem guten Zustand ist, keinen Schmutz sowie keine Beschädigung der Ohrbänder aufweist.



Für EU-Konformitätserklärung
bitte [hier](#) klicken.

BESCHRÄNKUNG

Verwenden Sie die Maske nicht oder halten Sie sich nicht in einem kontaminierten Bereich auf, wenn:

- a) Die Atmosphäre weniger als 19,5 % Sauerstoff enthält.
- b) Sie eine Verunreinigung riechen oder schmecken.
- c) Zum Schutz gegen Gase und Dämpfe!
- d) Vorsicht vor unbekanntem Schadstoffen oder Verschmutzungen, diese können lebensgefährlich sein!
- e) Für Sandstrahlen, Farbspritzarbeiten und Asbestbehandlung!
- f) In explosionsgefährdeten Bereichen!

WARNUNG

1. Überprüfen Sie das Ablaufdatum und die Maske vor der ersten Anwendung.
2. Benutzen Sie die Maske niemals nach Ablaufdatum.
3. Die Maske nicht in einem Mikrowellenherd erhitzen.
4. Überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass die Maske und die Bänder richtig fest sitzen.
5. Die Maske nicht in schlecht belüfteten Arbeitsräumen, in denen Sauerstoffmangel herrscht (unter 19,5 % vol. Sauerstoff) verwenden.
6. Bemerken Sie einen erhöhten Atemwiderstand, ersetzen Sie die Maske umgehend.
7. Um Die Maske sauber zu halten vermeiden Sie das Berühren der Innenseite mit Ihren Händen.
8. Nicht empfohlen für Kinder unter drei Jahren wegen zu geringer Lungenkapazität.
9. Bitte bewahren Sie die Maske in einem Temperaturbereich von -20°C bis 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80% auf.

LAGERUNG

Lagern Sie die Maske in einem versiegelten Behälter außerhalb des kontaminierten Bereichs; wenn nicht möglich, bewahren Sie die Maske während des Transports in der Originalverpackung auf.

Produktspezifikationen

Produktname: Filtrierende Halbmaske, FFP2 NR

Modell: YY0525

Material: 5-lagig, Doppelschicht Schmelzfilter, Filament Vliesstoff, Baumwoll-Filterwatte

Haltbarkeit: 3 Jahre

Entsprechung: EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR standard

Hersteller:

Jiangmen Yanyang Trading Co., Ltd.

Adresse: NO. 18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen, Guadong, China

Importiert von:

Shining Green GmbH


Graf-Stauffenberg-Ring 32b, 61350 Bad-Homburg



Verwendbar bis
2024/11



Siehe
Hersteller-Information

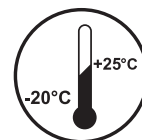

Temperaturbereich für
Lagerbedingungen



Max. relative
Luftfeuchtigkeit der
Lagerbedingungen

Weitere Informationen erhalten Sie in online unter
www.shop-wer.de

SERVICE HOTLINE: +49 2597 9612-90 | SERVICE E-MAIL: full-service@wer-gmbh.de Wir beraten Sie gerne!

Ein Angebot der WER GmbH | Messingweg 1 | 48308 Senden | full-service@wer-gmbh.de | www.shop-wer.de | Irrtümer vorbehalten | Es gelten unsere AGB