

FFP2 filtrierende Atemschutzmaske

CE 2834

Filtrierende Einwegmaske geprüft und CE zertifiziert gemäß der Norm EN 149:2001 + A:2009, Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung. Das Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung oder das Missachten der von uns aufgeführten Warnhinweise, kann die Wirksamkeit der Maske beeinträchtigen und somit keinen ausreichenden Schutz mehr vor Infektionen oder Krankheiten bieten. Bitte überprüfen Sie Maske und Nackenhalter vor der Anwendung daher auf eventuelle Beschädigungen oder Verschmutzungen. Wie bei jeder Art von Atemmaske, sollte der Träger hinreichend über deren korrekten Gebrauch informiert werden.

BESCHRÄNKUNG

Halten Sie sich nicht in einem kontaminierten Bereich auf, bzw. nutzen Sie die Maske nicht...


- Wenn die Atmosphäre weniger als 19,5% Sauerstoff enthält.
- Wenn Sie eine Verunreinigung riechen oder schmecken.
- Zum Schutz gegen Gase oder Dämpfe!
- Vorsicht vor unbekanntem Schadstoffen oder Verschmutzungen, diese können lebensgefährlich sein!
- Für Sandstrahlen, Farbspritzarbeiten und Asbestbehandlungen!
- In explosionsgefährdeten Bereichen!

WARNUNG

- Die mit „NR“ gekennzeichnete partikelfiltrierende Halbmaske darf nur einmalig verwendet werden.
- Niemals Teile in der vom Hersteller angegebenen Konfiguration ersetzen, ändern, hinzufügen oder weglassen!
- Diese Maske trägt zum Schutz gegen bestimmte partikelförmige Verunreinigungen bei. Das Risiko einer möglichen Erkrankung oder Infektion ist jedoch niemals vollständig auszuschließen.
- Es ist unwahrscheinlich, dass die Anforderungen an Dichtheit der Maske erfüllt werden, wenn eventuelle Gesichtsbehaarung ein fest sitzendes Anliegen der Maske verhindert.
- Die Maske sofort wechseln, wenn die Atmung erschwert oder die Maske beschädigt oder verformt wird.
- Wechseln Sie die Maske, wenn eine ordnungsgemäße Abdichtung am Gesicht nicht erreicht werden kann.
- Wechseln Sie die Maske sofort, sobald sie in einem kontaminierten Umfeld abgelegt wurde.


MASKE RICHTIG ANLEGEN

- Die Maske über Nase und Mund in Position halten.
- Die Ohrbänder hinter beide Ohren ziehen und mit Hilfe des Nackenbandes am Hinterkopf bequem aber fest sitzend justieren.
- Nasenklammer durch Drücken um die Nase herum formen, so dass die Maske dicht am Gesicht sitzt.
- Zur Überprüfung des korrekten Sitzes, beide Hände über die Maske halten und kräftig ausatmen. Wenn zuviel Luft an den Seiten austritt, positionieren Sie die Maske mittels den an den Ohrschlaufen befestigten Nackenhalter nochmals neu. Sollte beim Ausatmen zuviel Luft über die Kanten am Nasenbereich austreten, justieren Sie den Nasenclip mit leichten Druck nochmals nach.
- Wiederholen Sie die einzelnen Schritte bis die Maske einwandfrei und dicht sitzt.
- Wenn keine ordnungsgemäße Abdichtung erreicht werden kann, dürfen Sie eventuell kontaminierte Bereiche nicht betreten, da dies zu Krankheiten führen kann. Stellen Sie sicher, dass die Ohrschlaufen durch den Nackenhalter beim An- und Ablegen der Maske nicht beschädigt werden.

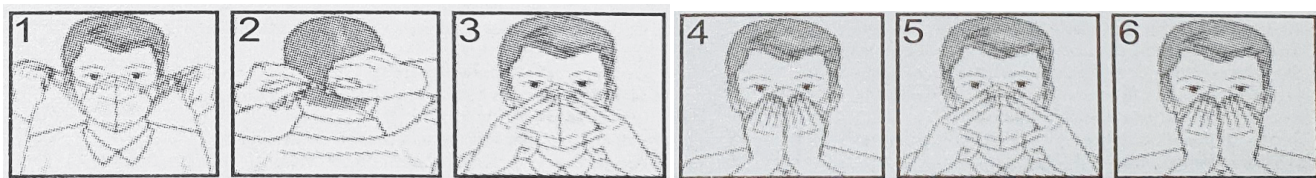

LAGERUNG

Entnehmen Sie die Maske aus der Verpackung erst unmittelbar vor ihrem ersten Einsatz und entsorgen Sie sie sofort nach einmaligem Gebrauch. Lagern Sie die Maske in einem versiegelten Behälter außerhalb des kontaminierten Bereichs; wenn nicht möglich, bewahren Sie die Maske während des Transports in der Originalverpackung auf.

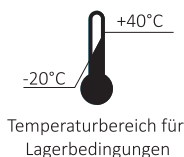

Hersteller: Anhui Zhongnan Air Defence Works Protective Co., Ltd.
Quinshan Comprehensive Economic Development Zone, anhui Province, China.
Trade mark: Zhongnan. Batch: V0110

Importiert von; Mtko CATAL Importaciones S.L.
Ctra. Huércal-Overa S/N 04640 Pulpi, Malmeria, Spain
Made in China

Weitere Informationen erhalten Sie in online unter www.shop-wer.de

SERVICE HOTLINE: +49 2597 9612-90 | SERVICE E-MAIL: full-service@wer-gmbh.de Wir beraten Sie gerne!

Ein Angebot der WER GmbH | Messingweg 1 | 48308 Senden | full-service@wer-gmbh.de | www.shop-wer.de | Irrtümer vorbehalten | Es gelten unsere AGB